



### КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА

#### Расширяя возможности

Универсальный баллонный катетер для любой процедуры эндопротезирования аорты

Клинические показания:

- Брюшная и грудная аорта
- Расправление складок и дораскрытие стент-графта
- Устранение эндоподтеканий

#### Широкий диапазон диаметров раздувания

#### ТАБЛИЦА РАСТЯЖИМОСТИ БАЛЛОНА

Баллон 46 мм	
Диаметр (мм)	Объем (мл)
10	3
20	9
30	19
40	41
46*	60

ВНИМАНИЕ: Раздувание баллона должно тщательно контролироваться под флюороскопией. Не достигайте максимального диаметра раздувания (46 мм). Может произойти разрыв баллона.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### БАЛЛОННЫЙ КАТЕТЕР RELIANT ДЛЯ СТЕНТ-ГРАФТА†

Код Продукта	Диаметр Раздувания (мм)	Диаметр Катетера (F)	Рабочая Длина (см)	Совместимость с Интродьюсером (F)
AV46	10–46	8	100	12

Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации для получения полного списка показаний, предупреждений и предостережений, возможных нежелательных явлений.

\* Максимальный диаметр раздувания.  
† Не содержит латекса.

### ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАРАНТИИ УСПЕХА

